


# 取 扱 説 明

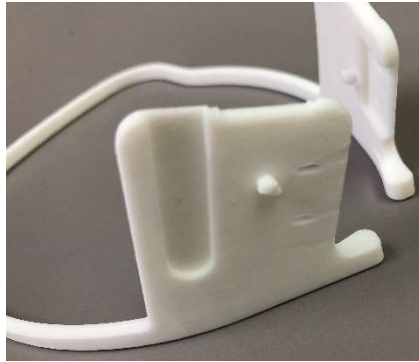

バイザーに「HEIKO クリスタルパック 厚口O 4S-A 4」又は  
「コクヨ クリアファイル フ-TC750N-0」を取り付けて使用します。

1、「HEIKO クリスタルパック 厚口O 4S-A 4」を使う場合  
留め方は、ゼムクリップ「大」又は「特大」かステープラ「11号」又は「3号」

(1)クリスタルパックの片辺をカッターで切り開く（図1）

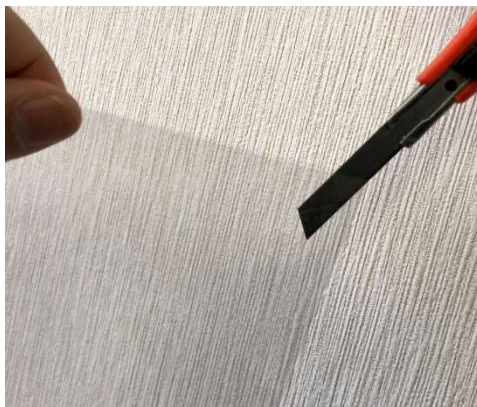


図1

(2)切り開いた面を開き中にフレームを入れゼムクリップで止める。（図2）  
又はステープラステープラ「11号」又は「3号」（図3）

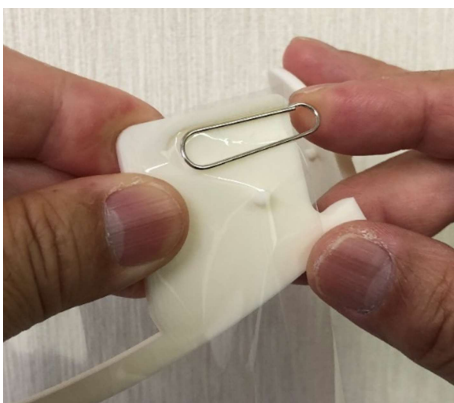


図2

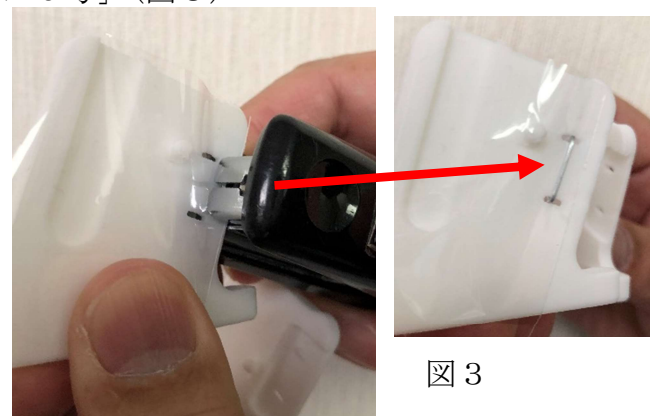


図3

長穴に合わせステープラを打つ。  
ステープラの針がしっかり折れ曲らない事が有るので、針を指で押え込み  
しっかり留める。

## 2、「コクヨ クリアファイル フ-TC750N-0」を使う場合

(1) クリアファイルにパンチャーを使い図4の様に穴を開ける。



- ① クリアファイル縦長にし、開いている方を右側にする。
- ② パンチを上側から一杯まで挿入し、クリアファイル右端から12mmの所に穴を開ける。

図4

(2) クリアファイルを広げ中にフレームの突起を空けた穴に通し、図5の様に取付はダブルクリップ「極豆(13mm)」又は「豆(15mm)」で止める。

(3) 図6の様に2つのつまみを折って、突起で固定する(内側も同様に)



図5

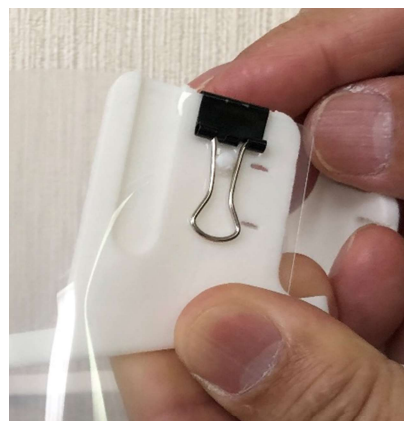


図6

\*取付けたバイザー角とフレーム角(\*A)が重なるように注意し留める。(図7)

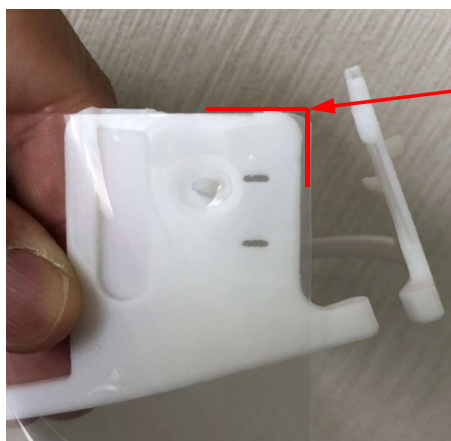


図7

\*A

3、「フェースシールド」を使用した際に、圧迫感を感じたり、曇る場合がありますが次のような使い方をすると軽減されます。

「HEIKO クリスタルパック 厚口04S-A4」「コクヨ クリアファイル フ-TC750N-0」同様の折り方をして下さい。

(1) 図8、9の様に折ります。

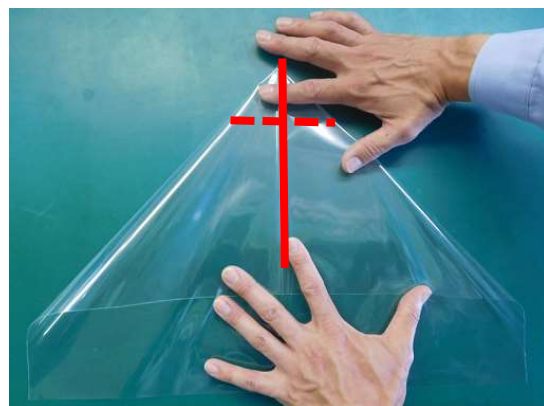


図8

図9

(2) 図10の様に先端を折って、矢印の部分にテープを貼って止めます。



図10

(3) フレームに取り付けます。



※赤い線の内側にスペースができ、  
圧迫感、曇りが軽減できます。

みなさま、過酷な現場で頑張ってください「ありがとうございます。」

どうぞ「ご安全に」